



KP-U



KP-U

Tabela parametrów standardowych:

MODEL: Kula pachowa uniwersalna	KP-U* wersja dla dorosłych	KP-U wersja dla dzieci
Wysokość całkowita w cm: min - max	117 – 150	dla wzrostu do 150cm
Wysokość regulacji dolnej w cm (od podłoża do rękojeści) skok co 2,5 cm	45 – 63	wg wzrostu dziecka
Wysokość regulacji górnej w cm (od rękojeści do podpaszki) co 3,5 cm	48 – 63	wg wzrostu dziecka
Materiał rurki	ALUM	ALUM
Rękojeść / podpaszka	PP / SZS	PP / SZS
Maks obciążenie w kg	120 kg	100 kg
Waga netto wyrobu	~ 1 kg	~ 0,75 kg
Nasadka dla rurki o średnicy	Ø 25	Ø 25

Standardowa tolerancja wymiarów: ± 1cm / ± 0,1kg*

PP – polipropylen ALUM – aluminium SZ – sztuczna skóra

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KULA PACHOWA UNIWERSALNA

**Modele:**

KP-U	Kula pachowa uniwersalna wersja dla dorosłych
KP-U	Kula pachowa uniwersalna wersja dla dzieci

SYMBOLE ZASTOSOWANE W KARCIE GWARANCYJNEJ, INSTRUKCJI OBSŁUGI I/LUB NA ETYKIECIE WYROBU



Dane Wytwórcy

mm-rrrr

Partia produkcyjna



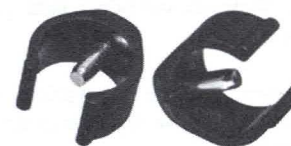
OSTRZEŻENIE: znak używany w przypadku informacji typu: **WAŻNE, NIE WOLNO, NIE NALEŻY**

Data aktualizacji i wydania instrukcji: 09-2014

ZASTOSOWANIE:

Kula pachowa uniwersalna wykorzystywana jest przez niepełnosprawnego albo chorego użytkownika do pomocy podczas chodzenia poprzez zapewnienie środków wsparcia oraz zwiększenie zdolności do poruszania się bez obecności innej osoby.

Rama kuli (rurka) wykonana z aluminium anodowanego, nasadka z gumy; rękojeść z polipropylenu (PP), materiał ochronny podpaszki wykonany ze sztucznej skóry.

ELEMENTY BLOKUJĄCE:

Zapinka (A4) pojedyncza z długim bolcem



Nakrętka z gwintem (B)



Pilot zatrzaskowy (C)

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Wyrób dostarczany jest standardowo w komplecie (2 szt.) w opakowaniu foliowym, zabezpieczony do transportu, po dokonaniu oględzin i regulacji, gotowy do użycia. Przed dokonaniem regulacji sprawdzić stan techniczny rurek (pod kątem pęknięć), rękojeści i podpaszki, nakrętek z gwintem (B), zapinek (A3). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zgłosić to bezzwłocznie u Sprzedającego lub bezpośrednio u Wytwórcy.

UWAGA: zachować oryginalny dokument zakupu (paragon, faktura VAT).

Po wyjęciu z opakowania foliowego, dokonaniu oględzin, należy dopasować żądaną wysokość do wzrostu użytkownika.

UWAGA: kule pachowe dostarczane są w najniższej wysokości (dokonać regulacji).

REGULACJA WYSOKOŚCI (zalecana pomoc drugiej osoby):

I. Regulacja górna podpaszki (reguluje położenie podpaszki w stosunku do rękojeści)

1. Zdjąć dwie zapinki (A3)
2. Poluzować nakrętki z gwintem (B)
3. Zewnętrzna rurkę wysunąć w górę, uzyskując potrzebną wysokość
4. Ustawić otwory rurek zewnętrznej oraz wewnętrznej tak, aby dokładnie nakładały się na siebie
5. Założyć zapinki (A3)
6. Dokręcić nakrętki (B)

II. Regulacja środkowa rękojeści (reguluje położenie rękojeści w stosunku do podpaszki i podłoża)

1. Zdjąć dwie zapinki (A3) umieszczone na rurkach pod rękojeścią
2. Przesunąć rękojeść na potrzebną wysokość uzyskując pokrycie się otworów rurek zew/wew.
3. Założyć dwie zapinki (A3)

III. Regulacja dolna wysokości kuli (reguluje całkowitą wysokość kuli)

1. Jedną ręką chwycić za rurkę dolną z nasadką, druga osoba trzymając korpus kuli wciska dwa piloty zatraskowe (C)
 2. Następnie przy wciśniętych pilotach zatraskowych wyciągnąć rurkę z nasadką na żadaną długość (skok co 2,5cm), delikatnie przekręcić wyciągniętą rurkę tak, aby piloty zatraskowe rozprężyły się i zablokowały się w otworach
- Sprawdzić wysokość wszystkich dokonanych regulacji z użytkownikiem, dopasować ponownie jeśli trzeba, upewnić się, że użytkownik stoi stabilnie z pomocą kul.

UŻYTKOWANIE wyrobu, zalecenia Wytwórcy:



Wyrób przeznaczony dla jednej osoby. Obsługa jedną ręką. Zaleca się używanie jednocześnie dwóch kul pachowych.

Wyrób przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Dopuszcza się eksploatację kuli pachowej dla dorosłych o wadze ciała do 120 kg

Dopuszcza się eksploatację kuli pachowej dla dzieci o wadze ciała do 100 kg



NIE WOLNO zawieszania ani przytwierdzania przedmiotów (np. toreb, plecaków) ani na rękojeści kuli, ani na jej podpaszce. Niezastosowanie się tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem ciała (np. podczas upadku) i/lub wyrobu. Wytwórca nie odpowiada za szkody, które wynikną z niezastosowania się do ww. obostrzenia.

Zużytą gumową nasadkę należy wymienić na nową. W okresie zimowym zaleca się stosowanie nasadki antypoślizgowej. Kontrolę nasadki użytkownik obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w okresie zimowym zalecamy codziennie.

Zużyty sprzęt należy oddać do recyklingu.

Dopasowanie wysokości wyrobu do parametrów użytkownika, sposób poruszania się z pomocą kul pachowych dokona i przekazuje użytkownikowi wskazówki osoba do tego medycznie upoważniona tj. lekarz, fizjoterapeuta, pracownik Sprzedawcy posiadający doświadczenie oraz poświadczone kwalifikacje do wydawania sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego w ramach umowy z NFZ.

Wskazania ogólne od Wytwórcy: w przypadku użytkowania jednej kuli, należy użytkować ją po stronie nogi zdrowej/zdrowszej.

CZYSZCZENIE / KONSERWACJA/PRZECHOWYWANIE:

1. Elementy z tworzywa, podpaszkę oraz rurki czyścić miękką gąbką, zwilżoną w łagodnym środku czyszczącym, po czyszczeniu przetrzeć wilgotną szmatką, wypolerować do sucha.
2. **NIE WOLNO** stosować do czyszczenia środków ściernych, mocnych detergentów, benzyny, rozpuszczalników, środków powierzchniowo czynnych wchodzących w reakcję z aluminium.

3. Koniecznie na bieżąco usuwać zanieczyszczenia ze spodu nasadki (włosy, nici, lód, błoto).
4. Wszelkie uszkodzenia, które wynikną ze złego czyszczenia, konserwacji wyrobu, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
5. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, wolnych od oparów chemicznych (zdala od sztucznych źródeł ciepła typu: kaloryfer, grzejnik, piec).
6. Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza (łazienka, pralnia, piwnice itp. lub na wolnym powietrzu) połączone z brakiem higieny zwłaszcza przy dłuższym przechowywaniu, będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych a tym samym gwarancji na wyrób.
7. Kontrolę stanu technicznego wyrobu (rurki, mocowania, rękojeść, zapinki (A), nakrętki (B), podpaszki - użytkownik dokonuje samodzielnie, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Nasadkę kontroluje nie rzadziej niż raz na miesiąc, w okresie zimowym zalecamy codziennie.

GWARANCJA:

Gwarancja Wytwórcy obowiązuje przez okres 18 miesięcy od daty zakupu u Sprzedawcy, po okazaniu oryginału dowodu zakupu. Wyrób oddany do reklamacji musi być czysty, w przypadku przesyłki zapakowany bezpiecznie tak, aby nie uszkodził się podczas transportu.

Użytkownik dostarcza wyrób do Sprzedawcy lub bezpośrednio do Wytwórcy na własny koszt. Gwarancji podlegają wyłącznie wady fabryczne wyrobu ujawnione w wyrobie natychmiast po ich zaistnieniu, zgłoszone na druku gwarancji do Sprzedawcy lub bezpośrednio do Wytwórcy.

Gwarancji nie podlega zużycie: gumowej nasadki, rękojeści, podpaszki - wynikające z naturalnej i zgodnej z zaleceniami eksploatacji wyrobu.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Wytwórca nie odpowiada za uszkodzenia ciała i/lub wyrobu w następujących przypadkach:

- nieprawidłowego zamontowania części i akcesoriów przez użytkownika lub opiekunów/osoby trzecie
- samodzielnej modyfikacji części dokonanej przez użytkownika lub opiekunów/osoby trzecie
- użycia nieoryginalnych części i akcesoriów, dostępnych u Wytwórcy
- naturalnego ścierania i zużywania się części wymienionych w podpunkcie GWARANCJA
- wypadków spowodowanych używaniem uszkodzonego, zużytego, niewłaściwie dobranego przez osoby medycznie do tego upoważnione lub niezgodnie z zaleceniem Wytwórcy przechowywanego sprzętu
- użycia sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji obsługi.

SERWIS:

Wykryte wady, uszkodzenia należy zgłaszać u Sprzedawcy lub bezpośrednio u Wytwórcy pod adres wskazany w niniejszej Instrukcji obsługi. Przed dostarczeniem wyrobu do punktu serwisowego, zaleca się kontakt telefoniczny w celu dokonania wstępnej oceny problemu przez personel Sprzedawcy i/lub personel serwisowy Wytwórcy. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i użytkowania wyrobu, Wytwórca akceptuje zastosowanie/wymianę części zamiennych i/lub akcesoriów, na takie, które zostały zakupione wyłącznie u Wytwórcy. Niniejszym Wytwórca zaświadcza, że naprawy serwisowe – gwarancyjne oraz pogwarancyjne, przeprowadzane są tylko i wyłącznie przez serwis Wytwórcy.

Wytwórca:

Warsztat Ślusarsko-Mechaniczny
Julianna Okrutna
26-600 Radom, ul. Bliska 38
woj. mazowieckie, Polska
Tel./fax: +48 48 365 14 72
e-mail: w.s.m@wp.pl www.okrutna.pl

