

Instrukcja bezpieczeństwa – rękojeść kul (ergonomiczna / anatomiczna)

Przeznaczenie

Rękojeści kul (ergonomiczne i anatomiczne) zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpiecznego i komfortowego chwytu kuli. Dostępne są w dwóch wariantach:

- **Anatomiczna** – rękojeść prawa i lewa – to rękojeści wyprofilowane zgodnie z kształtem dominującej dłoni użytkownika.
- **Ergonomiczna** – uniwersalna, pasująca do obu dłoni.

Zasady bezpieczeństwa użytkowania

1. Dobór rękojeści

- Wybierz rękojeść odpowiednią dla dominującej ręki: prawą, lewą lub uniwersalną.
- Upewnij się, że rękojeść jest kompatybilna z modelem kuli, do której będzie zamontowana.

2. Montaż

- Montuj rękojeść wyłącznie przy użyciu dedykowanych śrub montażowych.
- Po zamocowaniu sprawdź stabilność – uchwyt nie powinien się poruszać ani obracać.

3. Chwyt i powłoka

- Rękojeść posiada twardą lub miękką, podgumowaną, antypoślizgową powłokę, zapewniającą pewny chwyt.
- Zawsze trzymaj kulę pewnie, aby uniknąć poślizgu dłoni.
- W przypadku zużycia powłoki lub uszkodzeń natychmiast wymień uchwyt bądź całą kulę.

4. Kontrola stanu technicznego

- Regularnie sprawdzaj mocowanie rękojeści oraz stan jej powierzchni.
- Nie używaj rękojeści wykazującej pęknięcia, odkształcenia lub luzu.

5. Użytkowanie

- Rękojeści anatomiczne i ergonomiczne poprawiają komfort i bezpieczeństwo przenoszenia ciężaru ciała.
- Używaj rękojeści zgodnie z jej przeznaczeniem – nie stosuj jej do innych przedmiotów ani do wspinania się.

Uwagi końcowe

- Rękojeść jest elementem wymiennym, sprzedawana pojedynczo.
- Wybór odpowiedniego wariantu (prawa/lewa) lub uniwersalna jest kluczowy dla wygody użytkowania oraz bezpieczeństwa.
- Zachowaj instrukcję i stosuj się do wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko urazu.