

Instrukcja bezpieczeństwa – Odblask do kul inwalidzkich

1. Przeznaczenie produktu

Odblask przeznaczony jest do zwiększenia widoczności użytkownika kul inwalidzkich po zmroku, w warunkach ograniczonej widoczności oraz na drogach publicznych.

Nie jest to element ochrony osobistej w rozumieniu przepisów o środkach ochrony indywidualnej, lecz dodatek poprawiający bezpieczeństwo.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Mocowanie:**
 - Odblask należy przymocować do kuli w miejscu dobrze widocznym z przodu, z boku lub z tyłu.
 - Mocowanie powinno być stabilne - nie może przeszkadzać w chodzeniu, chwycie ani regulacji wysokości kuli.
 - Upewnij się, że powierzchnia, do której mocujesz odblask, jest czysta i sucha.
- Widoczność:**
 - Upewnij się, że odblask nie jest zasłonięty przez odzież, torby lub inne elementy.
 - Zaleca się stosowanie co najmniej dwóch odblasków - po jednej stronie każdej kuli.
- Czyszczenie i konserwacja:**
 - Czyść odblask miękką, wilgotną ściereczką.
 - Nie używaj środków chemicznych ani materiałów ściernych, które mogą zmatowić powierzchnię.
 - W razie uszkodzenia lub znacznego zarysowania wymień odblask na nowy.
- Warunki użytkowania:**
 - Używaj odblasku wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
 - Nie narażaj odblasku na działanie wysokiej temperatury (np. grzejniki, ogień).
 - Nie modyfikuj ani nie przerabiaj mocowania.

3. Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem sprawdź:

- czy odblask jest dobrze przymocowany,
- czy nie jest zabrudzony, pęknięty lub odklejony,
- czy nadal odbija światło w sposób widoczny z odległości co najmniej 100 m przy oświetleniu reflektorami samochodu.

W przypadku uszkodzenia lub utraty właściwości odblaskowych - natychmiast wymień produkt.

4. Ostrzeżenia

- Nieprawidłowe zamocowanie odblasku może ograniczyć jego skuteczność i zwiększyć ryzyko wypadku.
- Odblask nie zastępuje innych środków bezpieczeństwa, takich jak kamizelka odblaskowa czy oświetlenie.
- Produkt nie jest zabawką - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5. Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony odblask należy wyrzucać do pojemnika na odpady tworzyw sztucznych. Nie wyrzucać do środowiska naturalnego.

6. Producent / Dystrybutor

Symbolverzeichnis



Artikelnummer



Chargennummer



Lesen Sie die
Bedienungsanleitung



Dieses Produkt erfüllt die
Anforderungen der
Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)



Hersteller



Herstellungsdatum



Achtung



Medizinprodukt



Vertrieb durch



Zulässiges
Körpergewicht



Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
GERMANY

Phone
Fax
Internet
E-Mail

+49 (0) 59 71-9 80 46 0
+49 (0) 59 71-9 80 46 16
www.ossenberg.com
info@ossenberg.com