

## Instrukcja bezpieczeństwa

### Nakładki neoprenowe na rękojeść kuli ortopedycznej

#### Przeznaczenie produktu:

Nakładki neoprenowe na rękojeści kul ortopedycznych służą do poprawy komfortu użytkownika poprzez zmniejszenie ucisku i ograniczenie ryzyka otarć dłoni podczas korzystania z kul.

#### Zasady bezpiecznego użytkowania

1. **Sprawdź kompatybilność:**

Upewnij się, że nakładka pasuje do modelu używanej przez Ciebie kuli ortopedycznej.

2. **Prawidłowy montaż:**

- Otwórz zamek błyskawiczny lub odepnij rzep.
- Umieść nakładkę na rękojeści kuli, tak aby równomiernie przylegała do jej powierzchni.
- Starannie zamknij zamek na całej długości lub zapnij dokładnie rzep.  
Nieprawidłowe założenie nakładki może obniżyć stabilność chwytu.

3. **Sprawdź stabilność chwytu:**

Po zamontowaniu upewnij się, że nakładka nie przesuwa się i dobrze przylega. W przypadku luźnego trzymania lub przemieszczania się nakładki – **nie używaj kuli** do czasu ponownego, poprawnego zamontowania.

4. **Unikaj uszkodzeń:**

Nie używaj nakładki, jeśli neopren, szwy lub zamek są uszkodzone lub gdy rzep nie trzyma. Nie ciągnij za zamek/rzep pod dużą siłą.

5. **Użytkowanie w warunkach wilgoci:**

Materiał jest wodoodporny, jednak zaleca się dokładne wysuszenie nakładki po kontakcie z wodą, aby zapobiec poślizgowi.

6. **Czystość i higiena:**

Czyść nakładkę wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem.

Nie pierz w pralce ani nie susz na źródłach ciepła (np. grzejniku).

7. **Przechowywanie:**

Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, aby zapobiec degradacji neoprenu.

8. **Dla bezpieczeństwa użytkownika:**


Nakładka nie zastępuje właściwie dopasowanej kuli ortopedycznej. W przypadku pogorszenia stabilności lub pojawienia się bólu dłoni skonsultuj się ze specjalistą.

#### Symbolverzeichnis

 **REF** Artikelnummer

 Hersteller

 Vertrieb durch


 **LOT** Chargennummer


 Herstellungsdatum

 Zulässiges Körpergewicht

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung

 Achtung

 Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)

 Medizinprodukt