

Instrukcja Bezpieczeństwa – Uchwyt do laski (1855P)

1. PRZEZNACZENIE WYROBU

Uchwyt do laski przeznaczony jest do czasowego zawieszania lub odkładania lasek, kijów oraz podpórek na stabilnych krawędziach stołów, blatów oraz innych płaskich powierzchniach. Produkt ułatwia bezpieczne przechowywanie laski w zasięgu ręki użytkownika.

2. OPIS DZIAŁANIA

Uchwyt posiada podwójne zastosowanie – jedną stroną może być zawieszany na krawędzi blatu, a drugą ustawiany na płaskiej powierzchni. Dzięki dwóm różnie ukształtowanym bokom możliwe jest wygodne umieszczenie laski w różnych warunkach. Wbudowany magnes zapewnia dodatkowe wsparcie stabilizujące. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia obsługę, szczególnie osobom z osłabieniem mięśni.

3. ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Produkt przeznaczony jest do lasek, kijów i podpórek o średnicy drążka od 18,5 mm do 26 mm.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnia, na której będzie używany uchwyt, jest stabilna, równa i sucha.
- Uchwyt należy montować wyłącznie na stabilnych i prostych krawędziach blatów.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny uchwytu.
- Laskę należy umieszczać ostrożnie, bez gwałtownych ruchów.
- Magnes pełni funkcję wspomagającą – nie zabezpiecza w pełni przed zsunieniem się laski.
- Po zawieszeniu laski należy upewnić się, że uchwyt jest stabilnie osadzony.

5. OSTRZEŻENIA

- Uchwyt nie jest przeznaczony do podpierania się, wstawiania ani przenoszenia ciężaru ciała.
- Nie wolno wieszać na uchwycie ciężkich przedmiotów, toreb, plecaków ani zakupów.
- Nie stosować uchwytu na śliskich, mokrych, niestabilnych lub zaokrąglonych powierzchniach.
- Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku uszkodzenia uchwytu lub poluzowania magnesu należy natychmiast zaprzestać użytkowania.

6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

8. DANE TECHNICZNE

- Zastosowanie: laski, kijki, podpórki
- Zakres średnicy drążka: 18,5 mm – 26 mm
- Ilość w opakowaniu: 1 sztuka

Symbolverzeichnis

 REF	Artikelnummer	 LOT	Chargennummer		Lesen Sie die Bedienungsanleitung		Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
	Hersteller		Herstellungsdatum		Achtung		Medizinprodukt
	Vertrieb durch		Zulässiges Körpergewicht				

 **Ossenberg GmbH**
Kanalstraße 79
48432 Rheine
GERMANY

Phone +49 (0) 59 71-9 80 46 0
Fax +49 (0) 59 71-9 80 46 16
Internet www.ossenberg.com
E-Mail info@ossenberg.com

This is a product according to the guidelines of the Medical Devices Directive. Furthermore the Ossenberg GmbH is certified according to DIN EN ISO 13485.