

Przeznaczenie:

Laski tradycyjne inwalidzkie przeznaczone są dla osób o lekko utrudnionej możliwości poruszania się, utrzymania równowagi, jednakże zachowujących zdolność chodzenia w stopniu wystarczającym oraz dla osób z zaburzeniami koordynacji ruchowej. Służą one do utrzymania, wspierania i zabezpieczania chodzenia lub do częściowego odciążenia jednej z kończyn dolnych. Modele ozdobne często z rękoma niestandardowego kształtu nie nadają się do ciężkich podparć lub ortopedycznych zastosowań. Laska taka pełni funkcję dopełnienia formalnego wyglądu. **Prosimy o przestrzeganie wskazań dotyczących bezpieczeństwa!**

Wskazania:

- niewielkie zaburzenia równowagi.

Przeciwwskazania:

Lasek inwalidzkich nie stosuje się w przypadku utraty obu kończyn górnych lub przykurczu/uszkodzenia stawów obu kończyn górnych.

- nie używaj produktu w przypadku ciężkich zaburzeń poznawczych,
- nie używaj produktu w przypadku dużych problemów z zachowaniem równowagi,
- nie używaj produktu w przypadku dużych zaburzeń motorycznych lub percepcyjnych,
- nie używaj produktu w przypadku osłabienia kończyn górnych.

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Na lasce ozdobnej nie należy wieszać żadnych toreb, worków ani innych przedmiotów. Laski ozdobnej **nie należy używać do celów innych niż te, do których jest przeznaczona**, np. do podnoszenia lub przesuwania przedmiotów lub jako pomocy w przełączaniu włączników światła albo przyciskania przycisków windy! Przyczepność do podłoża jest kluczowa dla bezpiecznego trzymania laski inwalidzkiej! Należy unikać wilgotnych powierzchni lub podłoży takich jak żwir, piasek, liście, lód czy śnieg! **Prosimy zwrócić uwagę na miejsca groźące potknięciem się**, takie jak nierówności, dziury w podłożu, luźne wykładziny podłogowe lub krawędzie, ponieważ laska inwalidzka może niespodziewanie ześlizgnąć się lub ugrzęznąć! Szczególną ostrożność należy zachować w warunkach niedostatecznego oświetlenia, ponieważ nierówności na powierzchniach są wtedy słabo widoczne!

Zastosowanie:

Modele ozdobne, z rękoma niestandardowego kształtu nie nadają się do ciężkich podparć lub ortopedycznych zastosowań. Laska taka pełni funkcję dopełnienia formalnego wyglądu. Nie wolno korzystać z laski inwalidzkiej w wodzie. Należy unikać stałego kontaktu laski inwalidzkiej z wilgocią. W przypadku zawilgocenia należy ją odpowiednio wysuszyć. Laski należy używać zawsze po przeciwnej stronie do chorej lub nadwerężonej nogi! Laskę powinno się prowadzić blisko ciała, a nie ukośnie na zewnątrz! W przeciwnym razie może dojść do upadku! Podczas wchodzenia po schodach nie należy używać zdobionej laski. Należy dłonią koniecznie trzymać się poręczy.

Środki ostrożności:

Korzystanie z laski ozdobnej nie odciąża poszczególnych partii ciała! Może powodować niepożądane skutki uboczne:

Na dłoniach mogą powstać odgniecenia lub otarcia! Należy pamiętać, że na początku jej stosowania lub przy długotrwałym obciążeniu może to prowadzić do bólu i przemęczenia! Zalecamy robienie przerw!

Bezpieczeństwo:

- warto skonsultować się ze sprzedawcą aby doprecyzować prawidłową wysokość produktu,
- nie przechowuj produktu na zewnątrz ani nie wystawiaj na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
- sprawdzaj regularnie stan wizualny,
- w razie upadku – pozwól lasce upaść na bok, abyś nie upadł razem na nią,
- poruszaj się spokojnie, małymi krokami, upewniając się, że kontrolujesz równowagę,
- nie używaj laski na mokrej i śliskiej nawierzchni (woda, śnieg, lód),
- podczas użytkowania zachowaj szczególną ostrożność na nierównej nawierzchni – deformacja gruntu, wystająca płyta chodnikowa, dziury w jezdni itp.,
- nie używaj na schodach – ryzyko poważnych obrażeń,
- używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem – jako pomoc w delikatnym podparciu i we właściwy sposób - nie używaj jako dźwigni,
- przestrzegaj limitu wagi użytkownika umieszczonej na etykiecie produktu lub w instrukcji obsługi,
- dla własnego bezpieczeństwa nie wprowadzaj do produktu żadnych zmian lub modyfikacji,
- po rozłożeniu produktu upewnij się, że wysokość jest dopasowana prawidłowo i wypoziomowana z podłożem,
- nie zawieszaj nic na produkcie w trakcie jego użytkowania,
- ZAWSZE przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź czy produkt jest stabilny,
- nie przechowuj produktu na zewnątrz,
- nasadki gumowe zużywają się i muszą być regularnie wymieniane na nowe (nie podlegają gwarancji).

Przechowywanie i pielęgnacja:

Laski ozdobnej nie należy przechowywać w pobliżu źródeł ciepła takich jak piec, kaloryfery lub na kokpicie w samochodzie. Nie wystawiać laski przez dłuższy okres czasu na działanie promieni słonecznych! Silne słońce lub wysoka temperatura powodują uszkodzenia materiału! **Podkładka gumowa ulega zużyciu i musi być regularnie wymieniana.** Po dłuższym czasie niekorzystania z laski można jej używać tylko po uprzednim sprawdzeniu przez wykwalifikowany personel!

Ostrzeżenie! Nigdy nie czyść uchwytu ani osłony gumowej substancjami olejowymi! Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się! W razie zabrudzeń laskę należy czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i miękką szmatką. Nigdy nie należy stosować środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, ponieważ można spowodować uszkodzenie drewna! **Informacja:** W przypadku konieczności przeprowadzenia dezynfekcji należy użyć odpowiedniego środka dezynfekującego. Należy przestrzegać instrukcji użytkowania podanej przez producenta.

Ograniczenie użytkowania: Należy przestrzegać podanej na produkcie maksymalnej dopuszczalnej masy ciała! W przypadku potrzeby stabilnego wsparcia, należy wybrać tradycyjną laskę a nie model zdobiony. Nie należy używać wygiętej lub uszkodzonej laski ortopedycznej, ponieważ nie zapewnia ona wymaganej stabilności! Ze względu na niebezpieczeństwo złamania wygiętej laski inwalidzkiej nie wolno prostować! Informacja: Wszystkie zaistniałe zdarzenia związane z produktem należy zgłaszać producentowi lub właściwemu urzędowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent zamieszkuje.

Gwarancja i odpowiedzialność:

Jeżeli pomimo zachowania najwyższych standardów jakości wystąpi uzasadniona wada fizyczna, firma ma prawo w ramach 12-miesięcznej gwarancji, według własnego uznania, naprawić produkt wadliwy lub dostarczyć produkt nowy i wolny od wad. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku naszych produktów, w szczególności produktów na zamówienie, obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy prawne. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku modyfikacji naszych produktów. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z zużycia lub nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Części ulegające zużyciu nie podlegają gwarancji. Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne i akcesoria! W sprawie części zamiennych, akcesoriów i napraw należy kontaktować się ze sklepem specjalistycznym.

Utylizacja:

Prosimy zapytać swojego specjalistę o lokalne przepisy dotyczące utylizacji.

Katalog symboli

REF

Numer artykułu

LOT

Numer partii



Prosimy przeczytać instrukcję obsługi.



Uwaga



Producent



Data produkcji



Dopuszczalna masa ciała



Ten produkt spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu UE 2017/745 (MDR).



Ossenberg GmbH
Ulica Kopalnicza 79
48432 Ren
NIEMCY

Telefon
Faks
Internet
E-mail

+49 (0) 59 71- 9 80 46 0
+49 (0) 59 71- 9 80 46 16
www.ossenber.com
info@ossenber.com

Jest to produkt zgodny z wytycznymi Dyrektywy o Wyrobach Medycznych. Ponadto Ossenberg GmbH jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 13485.

Stan 08.07.2021



DIN EN ISO 13485
REG.-NR. MQ1 0115318



Najnowsze instrukcje użytkowania znajdziesz tutaj:
<http://bilder.ossenber.com/Dokumente/Downloads-zum-Artikel/Gebrauchsanweisungen/PDF/Instructions-for-use-walking-sticks-EN.pdf>