

Instrukcja użytkownika nasadki z wkładką stalową

Przeznaczenie i wskazania

Nasze wskazówki mają na celu wspomaganie, ułatwienie i zabezpieczenie chodzenia przy pomocy kuli lub laski. Proszę zwrócić uwagę na zasady bezpieczeństwa!

Przeciwwskazanie

Brak przeciwwskazań.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Przed każdym użyciem sprawdź, czy kula działa prawidłowo i czy nasadka jest pewnie zamocowana. Regularnie sprawdzaj, czy nasadka nie jest uszkodzona lub zużyta. W razie konieczności wymień ją. Dobra przyczepność do podłoża jest kluczowa dla pewnego chwytu kul. Unikaj mokrej gleby i powierzchni takich jak żwir, piasek, liście, lód i śnieg. Należy uważać na przeszkody, o które można się potknąć, takie jak nierówne powierzchnie, dziury w podłodze, luźne okładziny lub krawędzie, ponieważ kula może się niespodziewanie ześlizgnąć lub zatonać. Szczególną ostrożność należy zachować w warunkach słabego oświetlenia, ponieważ trudno wtedy dostrzec nierówność podłoża.

Montaż nasadki zaciskowej

Zdejmij starą nasadkę z kuli lub laski i załóż nową na rurkę. Uwaga! Sprawdź, czy nasadka jest mocno osadzona.

Używanie

Korzystając z pomocy przy chodzeniu, nigdy nie można całkowicie wykluczyć ryzyka poślizgnięcia się lub upadku, szczególnie na śliskich i mokrych nawierzchniach. Podczas chodzenia trzymaj kulę lub laskę możliwie jak najbardziej pionowo i niezbyt daleko od ciała. Pozycja pochylona zwiększa ryzyko upadku.

Przechowywanie i pielęgnacja

Nigdy nie przechowuj nasadki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarniki, grzejniki lub na półkach w samochodzie! Nie wystawiaj nasadki na długotrwałe działanie promieni słonecznych! Silne słońce lub ciepło może uszkodzić materiał! Nasadka jest częścią eksploatacyjną i należy ją regularnie wymieniać. Uwaga! Nigdy nie czyść nasadki substancjami tustymi! Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się! W razie zabrudzenia nasadki należy ją wytrzeć łagodnym detergentem i miękką szmatką. Nie należy używać detergentów na bazie rozpuszczalników, gdyż niszczą one materiał. Uwaga: Jeśli dezynfekcja okaże się konieczna, należy zastosować odpowiedni środek dezynfekujący. Proszę zapoznać się z instrukcją użytkownika dostarczoną przez producenta.

Ograniczenia użytkowania

Nie wolno stosować uszkodzonych lub zużytych nasadek, gdyż nie zapewniają one już wymaganego poziomu bezpieczeństwa!

Ponowne wykorzystanie (wynajem) / czas użytkowania

Zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności za produkt ponosimy odpowiedzialność wyłącznie w momencie pierwszego wprowadzenia naszych produktów na rynek. Ponowne użycie produktu jest możliwe wyłącznie po jego wcześniejszym przetestowaniu przez nas. Żywoćność nasadki zależy od stopnia zużycia, ale wynosi maksymalnie 2 lata. Po upływie tego okresu użytkownik odpowiada za dalsze użytkowanie nasadki.

Gwarancja i odpowiedzialność

Zakupiłeś produkt marki Ossenberg wysokiej jakości. W przypadku uzasadnionej wady materiałowej, pomimo zachowania najwyższych standardów jakości, Ossenberg ma prawo, w ciągu 12-miesięcznego okresu gwarancji, naprawić wadliwy przedmiot lub wymienić go na inny, wolny od wad przedmiot według własnego uznania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek modyfikacji naszych produktów. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek normalnego zużycia lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem. Części eksploatacyjne nie są objęte gwarancją. Można stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria. W celu uzyskania części zamiennych, akcesoriów i napraw skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Gospodarka odpadami

Aby uzyskać informacje na temat regionalnych przepisów dotyczących usuwania odpadów, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Dane techniczne

REF	Pełna nazwa	Średnica
716	Nasadka z wkładką stalową	16 mm
719	Nasadka z wkładką stalową	19 mm

Średnica



Lista symboli

	Odniesienie		Numer partii		Przeczytaj instrukcję obsługi		Ten produkt spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych). Wyrob medyczny klasy I
	Producent		Data produkcji		Uwaga		
	Dystrybucja		Dopuszczalna masa ciała				

 Ossenberg GmbH
 ulica Kanalstraße
 79
 48432 Ren
 NIEMCY

Telefon
 Faks
 Internet
 E-mail

+49 (0) 59 71 -980 46 0
 +49 (0) 59 71 -980 46 16
 www.ossenberg.com
 info@ossenberg.com

Produkt ten jest zgodny z wytycznymi dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych.

Firma Ossenberg GmbH posiada certyfikat DIN EN ISO 13485.

Wersja 14.12.2023



DIN EN ISO 13485
 REG.-N.R. PCA 035-203

