

Odblask czerwony – naklejka na kule inwalidzkie, laski i balkoniki

1. Przeznaczenie produktu

Samoprzylepny element odblaskowy przeznaczony do stosowania na kulach inwalidzkich, laskach rehabilitacyjnych i spacerowych oraz balkonikach. Produkt poprawia widoczność użytkownika po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widoczności poprzez odbijanie światła (np. reflektorów pojazdów).

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Odblask należy przykleić w miejscu, które **nie ogranicza chwytu ani prawidłowego użytkowania sprzętu pomocniczego**.
- Produkt **zwiększa widoczność, ale nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym**.
- Zaleca się regularne sprawdzanie stanu naklejki.

3. Montaż

1. Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię drążka kuli, laski lub balkonika.
2. Usunąć warstwę ochronną z naklejki.
3. Przykleić odblask na wybranej powierzchni i mocno docisnąć.

Nie przyklejać na powierzchniach mokrych, tłustych lub zabrudzonych.

4. Ostrzeżenia

- W przypadku **uszkodzenia, odklejenia lub utraty właściwości odblaskowych** produkt należy wymienić.
- Produkt nie jest zabawką – **przechowywać poza zasięgiem małych dzieci**.
- Nie należy modyfikować produktu ani używać go w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

5. Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz źródeł ciepła.

6. Utylizacja

Zużyty produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych.