

INSTRUKCJA - FLIPSTICK

Jak używać kijka Flipstick:

Kijki Flipstick są praktyczne, łatwe w użyciu, lekkie i przetestowane pod kątem bezpiecznego udźwigu 130 kg/280 funtów.

Instrukcja użytkowania:

Aby przekształcić łaskę w siedzisko, naciśnij przycisk na górze trzonu – „odchyl” go do pozycji, a siedzisko zablokuje się.

Aby powrócić do pozycji łaski, naciśnij przycisk widoczny pośrodku listwy siedziska – „odchyl” go do tyłu, a siedzisko zablokuje się.

Upewnij się, że WSZYSTKIE sekcje trzonu są całkowicie zablokowane przed użyciem.

Aby przechowywać, rozłóż sekcje trzonu, złóż je i schowaj do torby na ramię.

NIGDY nie używaj kijka w pozycji pionowej, siedząc.