

**Przeznaczenie i wskazanie**

Nasze gumowe nasadki służą do utrzymania, ułatwienia i zabezpieczenia chodzenia w połączeniu z pomocami do chodzenia lub laską. Proszę również pamiętać o zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa!

**Przeciwwskazania**

Brak.

**Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Przed każdym użyciem sprawdź, czy kula ortopedyczna lub laska jest sprawna i czy gumowa nasadka jest dobrze dopasowana. Regularnie sprawdzaj gumową nasadkę pod kątem uszkodzeń lub zużycia i w razie potrzeby wymień ją. Przyczepność do podłoża jest kluczowa dla bezpiecznego trzymania chodzika! Unikaj mokrych podłóg i powierzchni takich jak żwir, piasek, liście, lód lub śnieg! Zwróć uwagę na punkty zaczepienia, takie jak nierówności, dziury w podłożu, luźne wykładziny podłogowe czy krawężdzie, ponieważ podpora może się niespodziewanie wyślizgnąć lub zapaść! Zachowaj szczególną ostrożność przy niedostatecznym oświetleniu, ponieważ nierówności w podziemiach są wtedy słabo widoczne!

**Montaż nakładki gumowej**

Wymij starą gumową nakładkę z laski lub pomocy w chodzeniu i załóż nową na drążek. Uwaga! Upewnij się, że gumowa nakładka jest dobrze dopasowana.

**Użytkowanie**

Ryzyko poślizgnięcia się lub upadku – zwłaszcza na śliskich i mokrych powierzchniach – nigdy nie może być całkowicie wykluczone podczas korzystania z pomocy do chodzenia. Podczas chodzenia należy ustawić kulę lub laskę jak najbardziej pionowo i niezbyt daleko od ciała. Zbyt ukośne ustawienie zwiększa ryzyko upadku!

**Przechowywanie i pielęgnacja**

Nigdy nie przechowuj gumowej nasadki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarniki, grzejniki, ani na półce w samochodzie! Nie wystawiaj gumowej nasadki na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas! Silne słońce lub ciepło uszkodzi materiał! Gumowa nasadka jest częścią zużywającą się i należy ją regularnie wymieniać. Uwaga! Nigdy nie czyść gumowych nasadek substancjami zawierającymi olej! Niebezpieczeństwo poślizgnięcia! W razie potrzeby wyczyść gumową nasadkę łagodnym środkiem czyszczącym i miękką ściereczką, jeśli jest zabrudzona. Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, ponieważ mogą one uszkodzić materiał! Uwaga: Jeśli konieczna będzie dezynfekcja, użyj odpowiedniego środka dezynfekującego. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi producenta.

**Ograniczenia użytkowania**

Uszkodzonych i mocno zużytych gumowych nasadek nie wolno używać pod żadnym pozorem, ponieważ nie zapewniają już wymaganego poziomu bezpieczeństwa! Uwaga: Wszystkie poważne incydenty związane z produktem należy zgłaszać producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

**Ponowne wykorzystanie (wynajem) / czas użytkowania**

Zgodnie z Ustawą o Odpowiedzialności za Produkt ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za pierwsze wprowadzenie naszych produktów na rynek. Zgadza się na ponowne użycie tylko po uprzednim przetestowaniu produktu. Żywotność gumowej nasadki zależy od stopnia zużycia, ale jest ograniczona do maksymalnie 2 lat. Po upływie tego okresu, dalsze użytkowanie gumowej nakładki leży po stronie użytkownika.

**Gwarancja i odpowiedzialność**

Zakupiłeś wysokiej jakości produkt Kowsky. Jeśli pomimo najwyższych standardów jakości wystąpi uzasadniona wada materiałowa, Kowsky ma prawo, w ramach 12-miesięcznej gwarancji, do naprawy wadliwego produktu lub wymiany na wolny od wad produkt zastępczy, według własnego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane modyfikacjami naszych produktów. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku zużycia lub niewłaściwego użytkowania. Części eksploatacyjne nie są objęte gwarancją. Można używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów! W sprawie części zamiennych, akcesoriów i napraw prosimy o kontakt ze specjalistycznym sklepem.










**Utylizacja**


Aby uzyskać informacje na temat regionalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

**Dane techniczne**

REF	Opis Produktu	A	REF	Opis Produktu	A
71600	Nasadka gumowa z wkładką stalową	16 mm	71601	Nasadka gumowa bez wkładu stalowego	16 mm
17101	Nasadka gumowa z wkładką stalową	18 mm	17130	Nasadka gumowa bez wkładu stalowego	18 mm

**Katalog symboli**

 Numer przedmiotu	 Numer partii	 Przeczytaj instrukcję obsługi	 Ten produkt jest zgodny z
 Produkcja	 Data produkcji	 Uwagi	wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).
 Dystrybuowane przez	 Dopuszczalna masa ciała		 Wyrób medyczny

 Erwin Kowsky GmbH & Co. KG  
 Telefon +49 (0) 43 21 -99 57 0  
 Oderstraße 73 24539 Faks +49 (0) 43 21 -99 57 57  
 Neumünster NIEMCY Internet www.kowsky.de  
 E-mail info@kowsky.de

