

Uchwyt Toolflex do montażu na ścianie -PL

Dla modeli 146P, 1461P, 1478P, 1481, 1479, 1482



Ogólne instrukcje dotyczące produktu

Uchwyt na kule i laski Toolflex służy do prostego i bezpiecznego mocowania pomocy do chodzenia, ułatwiając w ten sposób codzienne życie osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Uchwyt Toolflex charakteryzuje się następującymi cechami:


- Elastyczny EPDM guma w części uchwytu pewnie trzyma pomoce do chodzenia.
- Łatwe zakładanie bez większego wysiłku
- Wysoka obciążalność i odporność na wibracje.
- Szyna podporowa lub pojedyncze mocowanie do mocowania do ściany.



Montaż Toolflex na ścianie (dla wersji z szyną)

Mocowanie szyny nośnej z kilkoma elementami wsporczymi do ściany:

1. Zdejmij czarne zaślepki znajdujące się na końcach szyny nośnej i w razie potrzeby ściągnij uchwyty na boki z szyny (patrz ilustracje).
2. Znajdź odpowiednie miejsce na ścianie. Umieść szynę nośną w żądanej pozycji i zaznacz otwory wiertnicze.
3. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach. Upewnij się wcześniej, że w miejscu wiercenia nie ma rur doprowadzających lub kabli elektrycznych.
4. Przymocuj szynę do ściany. W tym celu użyj odpowiednich kołków i śrub, które nadają się do konstrukcji ściany.
5. Teraz należy ponownie wsunąć uchwyty na szynę nośną.
6. Na koniec załóż z powrotem zaślepki na końce szyny.

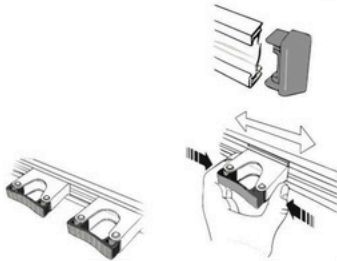

Montaż Toolflex na ścianie (dla wersji bez szyny)


Mocowanie pojedynczego elementu do ściany lub innej płaskiej powierzchni:

1. Najpierw wyjmij kolek blokujący z uchwytu i pociągnij element uchwytu do przodu (patrz ilustracja).
2. Znajdź odpowiednie miejsce na ścianie. Umieść uchwyt na kule i łaskę w żądanej pozycji i zaznacz otwory do wywiercenia.
3. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach. Upewnij się wcześniej, że w miejscu wiercenia nie ma rur doprowadzających lub kabli elektrycznych.
4. Przymocuj uchwyt do ściany. W tym celu użyj odpowiednich kołków i śrub, które nadają się do konstrukcji ściany.
5. Obróć element uchwytu z powrotem do pierwotnej pozycji i włóż kolek blokujący z powrotem do otworu.



Użytkowanie

Pomoce do chodzenia i laski można wcisnąć w uchwyty na urządzenia jednym prostym ruchem, zamocować je i wyjąć z uchwytu bez większego wysiłku. Zawsze sprawdzaj, czy uchwyty są solidnie zamocowane przed każdym użyciem. Podobnie, zawsze sprawdzaj, czy pomoc w chodzeniu jest dobrze zamocowana w uchwycie po każdym użyciu.

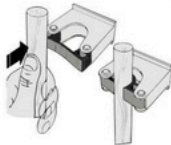

Czyszczenie

Czyszczenie i dezynfekcja mogą być wykonywane przy użyciu dostępnych w handlu produktów.

Gwarancje i odpowiedzialność

Zakupiłeś wysokiej jakości produkt Ossenberg. Jeśli pomimo najwyższych standardów jakościowych wystąpi uzasadniona wada materiałowa, Ossenberg ma prawo, w ramach 12-miesięcznej gwarancji, naprawić wadliwy przedmiot lub wymienić go na wolny od wad przedmiot w ramach kolejnej dostawy, według własnego uznania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane modyfikacjami naszych produktów. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających ze zużycia lub niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

Utylizacja

Części eksploatacyjne są wyłączone z gwarancji. Aby uzyskać informacje na temat regionalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Dane techniczne

Uchwyt na narzędzia do ściany				
Model	146P		1461P	1478P
Pełna nazwa	Uchwyt ścienny		Uchwyt do montażu pojedynczego	Uchwyt do montażu pojedynczego
Ø drążka	od 20 mm do ok. 30 mm		od 20 mm do ok. 30 mm	od 30 mm do ok. 40 mm
Artykuł	1481	1479	1482	
Długość	20cm	50cm	90cm	
nnny	W zestawie znajdują się materiały montażowe.			

Ossenberg GmbH
Ulica Kanalstraße 79
48432 Rheine
NIEMCY

Telefon +49 (0) 59 71 -980 46
Faks 0+49 (0) 59 71 -980 46 16
Sieć www.ossenberg.com
E-mail info@ossenberg.com